



İşitme cihazınız.

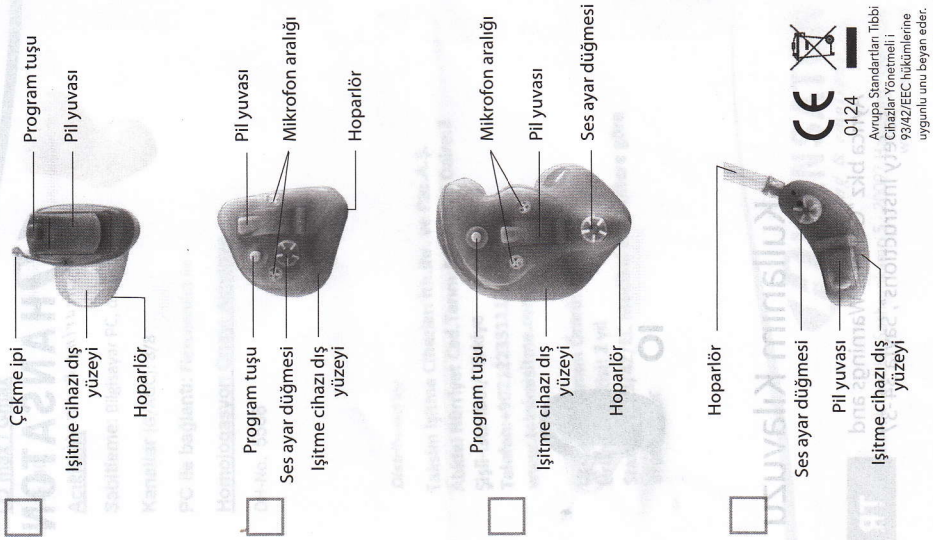

Avrupa Standartları Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği 93/42/EEC hükümlerine uygunluğunu beyan eder.

Pilin yerleştirilmesi ve değiştirilmesi.

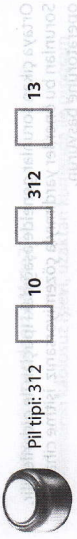

Pil tipi: 312 10 312 13

- Pil kapağını tırnağınızla açın ve kapağını tamamen dışarı doğru çıkarın.

Yardımcı gereç olmaksızın

- Ekski kutup aşağı gelecek şekilde pili açık olan pil kapağına yerleştirin.
- Pil kapağını (tık) sesini hissedene kadar kapatın.

Yardımcı gereçler

- Pil kapağını tırnağınızla açın ve kapağını tamamen dışarı doğru açın.
- Pili (artı kutbundan) fırçanızın mıknatıs tarafıyla alın.
- Ekski kutup aşağı gösterecek şekilde pili açık olan pil kapağına itin.
- Sonra fırçayı pilden ayırın.
- Klip sesi hissedene kadar pil kapağını itin.

! Yeni bir pilde tam güce ulaşması birkaç dakika sürebilir. Bundan sonra pil kapağını kapatın.

Yan işaret.

Kapalı durumdayken, bir renk işareti ile işitme sisteminin hangi kulak için optimum duruma getirildiğini görebilirsiniz.

Kırmızı yan işaret = sağ kulak **Mavi yan işaret = sol kulak**

İşitme cihazının takılması ve çıkarılması.

- İşitme cihazınızı baş parmak ve işaret parmağınızla tutun ve dikkatlice kulak girişinize sokun.
- Hafif bir çevirme hareketiyle doğru konuma getirirsiniz.
- Ahize kısmını bir elinizle hafiften yukarı ve geriye doğru çekin ve işitme cihazınızı diğer elinizin işaret parmağıyla biraz bastırın.
- Dışarı çıkarmak için cihazı kulak girişinden çıkarmak amacıyla kulağınızdan çekin. Bundan sonra işitme cihazınız (CIC de çekme ipiyle) kulağınızdan çıkarılabilir.

- Önce cihazın hortum ucunu hafifçe kulak kanalınızın içine sokun ve ardından Noiser'i kulak kepecesinin içine yerleştirin.

- Noiser yerine tam olarak oturabilmesi için hafifçe öne doğru çevrilierek, kıkırdak kıvrımının içine kadar itilmelidir.

