

İşitme cihazının açılıp/kapatılması.

Pili yuvaya aracılıyla

Açma

• Pili kapagını kapatın.

Kapatma

• Pili kapagını açın.

Basma düğmesiyle

Açma

• 2 saniye için bu düğmeye basınız.

Kapatma

• 2 saniye için bu düğmeye basınız.

Uzaktan kumanda aracılıyla

• Uzaktan kumanda ayrı bir kulllanma talimatında tanımlanmaktadır.

Ses seviyesinin ayarlanması.

Düğmesi olmadan ayarlanması

Otomatik ses seviyesi ayarına sahip olduğundan dolayı işitme cihazın ses seviyesinin el ile ayarlanmasına gerek yoktur.

Düğmesi ile ayarlanması

Ses ayar düğmesini saat yönünde (sağ cihazlar) / saat yönüne zıt olarak (sol cihazlar) çevirdiğinizde cihazın sesi artar.

Ses ayar düğmesini saat yönüne zıt olarak (sol sistem) / saat yönünde (sağ sistem) çevirdiğinizde cihazın sesi kısılır.



Sol işitme sistemi

Doğru işitme sistemi

Azamlı veya aşgari ses seviyesine ulaştığınızda, ardi ardına birkaç kısa sinyali sesi duyulur.

Uzaktan kumanda aracılıyla

• Uzaktan kumanda ayrı bir kulllanma talimatında tanımlanmaktadır.

İşitme programları arasında değiştirme.

Basma düğmesiyle

• Program tuşu ile kişisel olarak programladığınız işitme programlarını seçebilirsiniz.

• Program değiştirdiğinizde, işitme sisteminiz size sinyal sesleri ile hangi programı seçtiğinizi bildirir.

Sinyal seslerinin sayısı ilgili programa bağlıdır (örn. 1. program 1 sinyal sesi, 2. program 2 sinyal sesi, 3. program 3 sinyal sesi, 4. program 4 sinyal sesi, 5. program melodi sesi, 6. program melodi sesi).

• Cihazınızı ilgili işitme durumuna uyarlayabilir ve böylece çok mikrofonlu teknoloji (Multimic) avantajlarını özellikle grup konuşmalarında kullanabilirsiniz.

Uzaktan kumanda aracılıyla

• Uzaktan kumanda ayrı bir kulllanma talimatında tanımlanmaktadır.

İşitme programı/İşitme programının tanımlanması

1

2

3

4

5

6