



Sorun giderme.

- İşitme cihazını T-coil modunda çalıştırırken, telsiz fonksiyonunda bir çarpıntı sesi meydana gelebilir. Bunun nedeni iletişim sinyallerinin işitme cihazı T-coil tarafından alınmasıdır.
- İşitme cihazınız T-coil modundayken uzaktan kumandayı 10 cm den (4 inç) daha büyük mesafelerde kullanınız.

Bakım uyarıları.

Temizlik için yalnızca işitme cihazı için üretilmiş olduğumuz HADEO bakım ürünlerini tavsiye ederiz. HADEO ürünlerini yalnızca işitme cihazı satıcınızdan temin edebilirsiniz.

- İşitme cihazının kendisi suya veya temizleme sıvısına bırakılmamalıdır.
- İşitme cihazı kuru tutulmalıdır. Cihazın içindeki nemi çekmek için cihazı geçeden bir HADEO DryBox'a, HADEO kurutma kesesine veya HADEO kurutma tüpüne koyun.
- İşitme cihazını kuru durumda (tercihen sabah) HADEO temizleme mendili ile temizleyin.
- Ses çıkış aralıkları küçük bir fırçayla (önce komple kurutun) temizlenebilir (sıvı uçlu malzemeler kullanmayın).

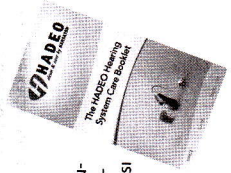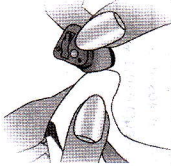

Bakım

HADEO bakım ürünlerimizi merkezimizden, şubelerimizden, bayilerimizden temin edebilirsiniz. İşitme cihazı satıcınız cihazınızın korunması ile ilgili her türlü sorunuza cevap vermekten mutluluk duyacaktır.

Ortaya çıkan sorunlar genelde aşağıdaki ipuçları ile giderilebilir. Sorunları bu öneriler yardımıyla çözemiyorsanız, işitme cihazı operatörüne başvurun.

Sorun

Ses zayıf veya yok.

Olası çözüm

- Boş pili değiştiriniz.
- Sesi artırınız.
- Cihazı temizleyiniz.
- Pil gözü kapağını tamamen kapatınız veya program düğmesine yaklaşık 2 saniye basınız ve basılı tutunuz.

Cihaz vizildama sesi yayıyor.

- Cihazı çarpıp tekrar takmayı deneyiniz.
- Cihazı temizleyiniz.

Ses bozuk.

- Boş pili değiştiriniz.
- Ses seviyesi düşük.
- Cihazı temizleyiniz.

Cihaz sinyal sesleri yayıyor.

- Pil bölümünü yavaş ve yumuşak bir şekilde tamamen kapatınız.
- Boş pili değiştiriniz.

Cihaz çalışmıyor.

- Cihazı açınız (devreye sokunuz).
- Pil bölümünü yavaş ve yumuşak bir şekilde tamamen kapatınız.
- Boş pili değiştiriniz.
- Pilin yerine doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz.
- Güç açık ertelenmesi aktif – 18 saniye bekleyiniz ve tekrar kontrol ediniz.

