

LINNEA Mini Canal

LO max / Gmax

115/40

Açıklama

Sabitleme: Bilgisayar PC, diz üstü

Kanallar (G/AGC): 8/8

PC ile bağlantı: Flexconnect ile

Homologasyon Onayı: Almanya

DH-No. 5586



Distributed by

Taksim İşitme Cihazları İth.İhr. ve Paz.A.Ş.

Abidei Hürriyet Cad.Tarım Apt.No:75 Daire:2

Şişli-İstanbul/Türkiye

Telefon: +902122331117

www.taksimisitme.com

Ürün Kullanım Ömrü: 10 yıl

Ürün Garantisi: 2 yıl

Standart: 93/42/EC Medikal direktiflere göre

üretimiştir

82264 EB-5P

HANSATON
hearing & emotions

Hansaton Akustik GmbH · Sachsenkamp 5 · 20097 Hamburg · Germany
www.hansaton.com

Aksesuarlar.

Uzaktan kumandanız eMote2

İşitme sisteminin kablosuz işlevi, uzaktan kumanda ile program edilmesini ve ses seviyesi değişikliklerinin yapılmasını sağlar. Diğer bilgileri işitme cihazı işletmecisinden alabilir veya uzaktan kumanda kılavuzunda bulabilirsiniz.



Eğer işitme sisteminizin uzaktan kumanda ile başka bir taraftan kontrol edildiğini belirlerseniz, işitme sisteminizi uzaktan kumandayı işitme cihazı işletmecisine götürünüz.

Uzaktan kumandanız miniMedia/Media

miniMedia/Media uzaktan kumanda ile işitme sisteminizi kablosuz en yeni teknoloji ile birlikte kullanabilirsiniz.



Özel bir Bluetooth bağlantısı sayesinde, cep telefonundan, televizyondan veya MP3 çalardan ses sinyalleri almak mümkün olur. Diğer bilgileri işitme cihazı işletmecisinden alabilir veya miniMedia/Media uzaktan kumanda kılavuzunda bulabilirsiniz.

İsteğe bağlı fonksiyonlar.

i-com2 / Bi-Com

• her iki işitme cihazını aynı anda otomatik olarak işitme cihazı ayarlarındaki değişikliklere, örneğin ses ve program değişikliklerini, aydurdur.

• uzaktan kumanda kullanımını sağlar.

i-com2/Bi-Com kablosuz, in performanslı, elektromanyetik parazitten-örneğin anahatlı güç kaynağıyla kontrol edilen bilgisayar monitöründen veya halojen ışık sisteminden - etkilenebilir.

• Böyle bir problem yaşarsanız parazit kaynağından uzaklaşınız.

Güç-açık-ertelemesi

• geri bildirim (vızıldamayı) önlemek amacıyla işitme cihazlarının açılmasını 6, 12 veya 18 saniye için ertelemeyi sağlar.

Servis hatırlatması

• Melodik bir sinyal, size işitme cihazı işletmecisinde olan bir sonraki servis randevunuzu hatırlatır.

Otomatik telefon programı

• Cihazınızın yakınına bir telefon tutunuz. İşitme cihazı otomatik olarak telefon programına geçer. Telefonu işitme cihazınızdan uzağa taşıyınız. İşitme cihazı otomatik olarak bir önceki programa geçer.

Bütün telefonlar PhoneConnect işlevini devreye sokacak kadar güçlü bir manyetik alan oluşturmazlar. Bu durumda işitme cihazı paketinizdeki PhoneConnect miknatısını kullanınız ve PhoneConnect işlevini devreye sokmak için bu miknatısı telefon ahizesine takınız.