



Ses seviyesinin ayarlanması.

Ses seviyesi ayarı olmayan cihazlarda ses seviyesi otomatik olarak ayarlanır.

Düğmesi ile ayarlanması

- İşitme sisteminin ses seviyesi, işitme sisteminin arka tarafında bulunan ses seviyesi regülatöründen kademeli olarak ayarlanabilir.

Azami veya asgari ses seviyesine ulaştığınızda, ardi ardına birkaç kısa sinyal sesi duyulur.

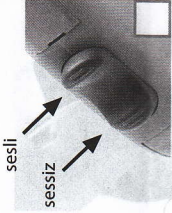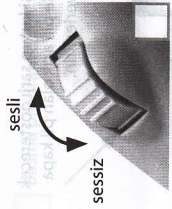

İşitme programları arasında değiştirme.

Basma program düğmesiyle

- Program tuşu ile kişisel olarak programladığınız işitme programlarını seçebilirsiniz.
- Program değiştirdiğinizde, işitme sisteminiz size sinyal sesleri ile hangi programı seçtiğinizi bildirir.

Sinyal seslerinin sayısı ilgili programa bağlıdır (örn. 1. program 1 sinyal sesi, 2. program 2 sinyal sesi, 3. program 3 sinyal sesi, 4. program 4 sinyal sesi, 5. program melodisi, 6. program melodisi sesi).

- Cihazınızı ilgili işitme durumuna uyarlayabilir ve böylece çok mikrofonlu teknolojinin (MultiMic) avantajlarını özellikle grup konuşmalarında kullanabilirsiniz.

Uzaktan kumanda aracılığıyla

- Uzaktan kumanda ayrı bir kullanma talimatında tanımlanmaktadır.

İşitme program/İşitme programının tanımlanması

1

2

3

4

5

6