


## İşitme cihazınız.

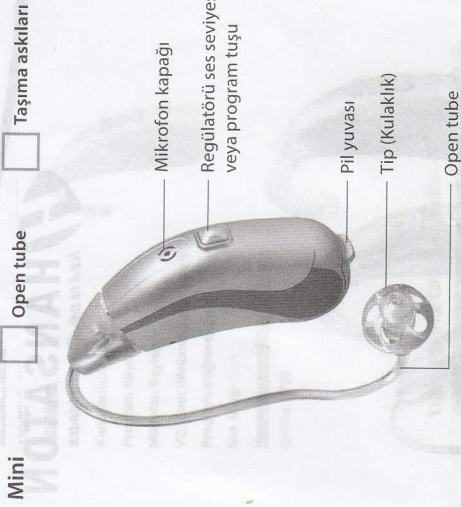

### Yan işaret:

Kırmızı yan işaret = sağ kulak

Mavi yan işaret = sol kulak


FCC ID: WU7-WL500

İşletim frekansı: FC=3.28 MHz

**CE** Avrupa Standartları Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği  
93/42/EEC hükümlerine uygunluğunu beyan  
0124 eder.




## İşitme cihazınız.

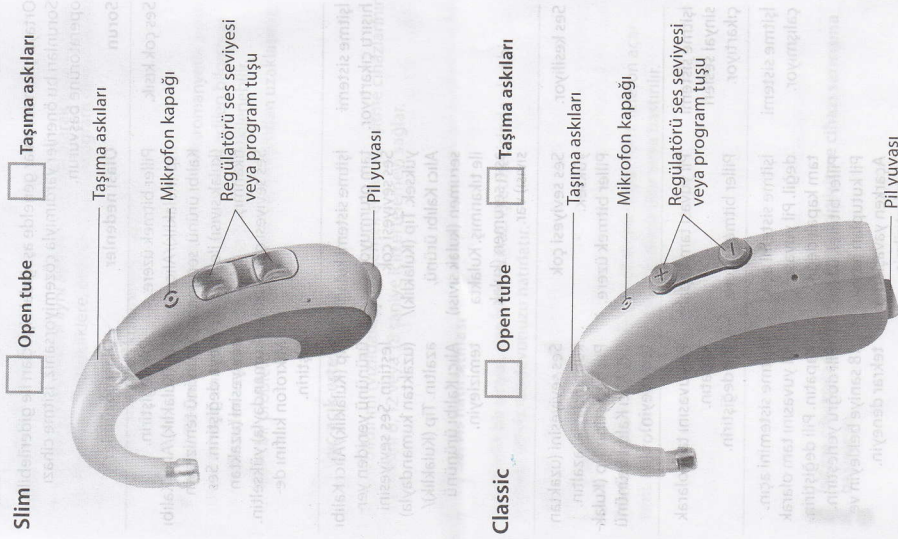

## Pillerin değiştirilmesi.

Pil tipi: 312

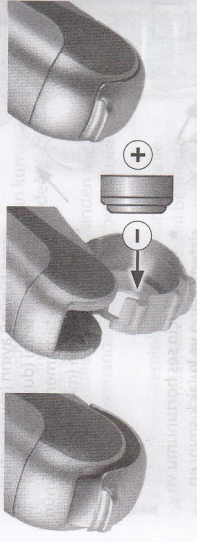


- Pil kapağını açın.
- Eksi kutup şarjı gösterecek şekilde pili açık olan pil kapağına yerleştirin.
- Pil kapağını kapatın.

**Yeni bir pilde tam güce ulaşması birkaç dakika sürebilir. Bundan sonra pil kapağını kapatın.**

## İşitme cihazının açılıp/kapatılması.

Pili yuvası aracılığıyla

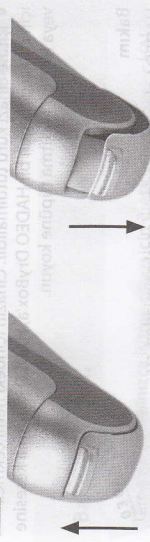

**Açma**

- Pil kapağını kapatın.
- Pil kapağını açın.

**Kapatma**