


Sorun giderme.

• Gerekliği zaman duyma sistemini açma tûpünü ayırın (mini hortum). Temizleme telini (duyma sistemi tarafından) tamamen açma tûpünün arasından geçirin (mini hortum).

• Temizlik için ses hortumunu ve sistemi ayırın ve kulak kısmını en az 15 dakikalığına HADEO temizlik banyosuna yatırın.

• Bir Click Dome kullanıyorsanız kubbeyi, ucunu sıkıştırarak temizleyin.

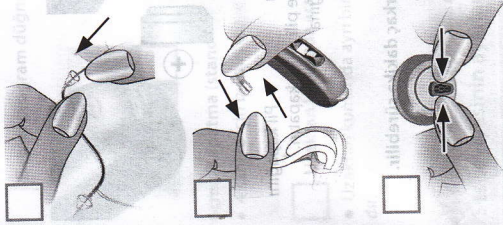

- İşitme cihazının kendisi suya veya temizleme sıvısına bırakılmamalıdır. İşitme cihazını kuru durumda HADEO temizleme mendilli ile temizleyin.
- İşitme cihazı kuru tutulmalıdır. Cihazın içindeki nemi çekmek için cihazı geçeden bir HADEO DryBox'a, HADEO kurutma kesesine veya HADEO kurutma tûpüne koyun.

Bakım

HADEO bakım ürünlerimizi merkezimizden, şubelerimizden, bayilerimizden temin edebilirsiniz. İşitme cihazı satıcınız cihazınızın korunması ile ilgili her türlü sorunuza cevap vermekten mutluluk duyacaktır.



Ortaya çıkan sorunlar genelde aşağıdaki ipuçları ile giderilebilir. Sorunları bu öneriler yardımıyla çözemiyorsanız, işitme cihazı operatörüne başvurun.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözümler
Ses çok kısık.	Piller bitmek üzere. Tip (Kulaklık)/Alıcı Kalıbı ürünü, serumen (kulak sıvısı) ile tıkanmış. Ses seviyesi çok düşük.	Pili değiştirin. Tip (Kulaklık)/Alıcı Kalıbı ürünü temizleyin veya değiştirin. Ses seviyesini (uzaktan kumandayla) yükseltin. Mikrofon kılıfını değiştirin.
İşitme sistemi hişirtti çıkartıyor.	İşitme sistemi kulağa tam oturmuyor. Ses seviyesi çok yüksek. Tip (Kulaklık)/Alıcı Kalıbı ürünü, serumen (kulak sıvısı) ile tıkanmış. Kulakta aşırı serumen (kulak sıvısı) var.	Tip (Kulaklık)/Alıcı Kalıbı ürünü yeniden yerleştirin. Ses seviyesini (uzaktan kumandayla) azaltın. Tip (Kulaklık)/Alıcı Kalıbı ürünü temizleyin.
Ses kesiliyor.	Ses seviyesi çok yüksek. Piller bitmek üzere.	Ses seviyesini (uzaktan kumandayla) azaltın. Pili değiştirin. Tip (Kulaklık)/Alıcı Kalıbı ürünü temizleyin.
İşitme sistemi sinyal sesleri çıkartıyor.	Pil yuvası tam kapalı. Piller bitmek üzere.	Pil yuvasını tam olarak kapatın. Pili değiştirin.
İşitme sistemi çalışmıyor.	İşitme sistemi açık değil. Pil yuvası tam kapalı değil. Piller bitmek üzere. Pil kutupları hatalı. Açarken yavaşlama etkinleştirilmiş.	İşitme sistemini açın. Pil yuvasını tam olarak kapatın. Pili değiştirin. Pili doğru yerleştirin. 18 saniye bekleyin ve tekrar deneyin.

HANSATON
hearing & emotions



Classic

Slim

Mini

Kullanım Kılavuzu

Ayrıca bkz "General Warnings and Safety Instructions", Sayfa 45-49

TR