

LINNEA Classic

LO max./Gmax

130/60

**Açıklama**

**Sabitleme:** Bilgisayar, PC, diz üstü

**Kanalları(G/AGC):** 8/8

**Program Sayısı:** 5

**Mikrofon Sayısı:** 2

**VC:** Evet (Mekanik Endstoplu VC)

**Program Düşmesi:** Evet

**Ses Girişi:** Evet

**Homologasyon Onayı Almanya**

DH-No. 5725



**Distributed by**

**Taksim İşitme Cihazları İth.İhr. ve Paz.A.Ş.**

**Abidei Hürriyet Cad. Tarım Apt.No:75 Daire:2**

**Şişli-İstanbul/Türkiye**

**Telefon: +90212233117**

**www.taksimistime.com**

**Ürün Kullanım Ömrü: 10 yıl**

**Ürün Garantisi: 2 yıl**

**Standart: 93/42/EC Medical direktiflere göre**

**üretimiştir**

**HANSATON**  
hearing & emotions

Hansaton Akustik GmbH · Sachsenkamp 5 · 20097 Hamburg · Germany  
www.hansaton.com

## İsteğe bağlı fonksiyonlar.

i-com2 / Bi-Com

- her iki işitme cihazını aynı anda otomatik olarak işitme cihazı ayarlarındaki değişikliklere, örneğin ses ve program değişikliklerine, uydurur.
- uzaktan kumanda kullanımını sağlar.

- i-com2/Bi-Com kablolu, in performansı, elektromanyetik parazitten-örneğin anahtarlı güç kaynağıyla kontrol edilen bilgisayar monitoründen veya halojen ışık sisteminden - etkilenebilir.
- Böyle bir problem yaşarsanız parazit kaynağından uzaklaşınız.

Güç-açık-ertelemesi

- geri bildirim (vızıldamay) önlemek amacıyla işitme cihazlarının açılması 6, 12 veya 18 saniye için ertelemeyi sağlar.

Servis hatırlatması

- Melodik bir sinyal, size işitme cihazı işletmecisinde olan bir sonraki servis randevunuzu hatırlatır.

Telefon bobini

- Telefon bobini indüktif bir sinyal almasını sağlar (örn. telefon açarken). Mikrofon üzerinden ses alış, düşürülür veya bastırılır.

## Aksesuarlar.

Uzaktan kumandanız eControl

İşitme sisteminin kablolu işlevi, uzaktan kumanda ile program değişiminin ve ses seviyesi değişikliklerinin yapılmasını sağlar.

Diğer bilgileri işitme cihazı işletmecisinden alabilir veya uzaktan kumanda kılavuzunda bulabilirsiniz.


- Eğer işitme sisteminizin uzaktan kumanda ile başka biri tarafından kontrol edilmesini belirlerseniz, işitme sisteminin ve uzaktan kumandayı işitme cihazı işletmecisine götürünüz.

Uzaktan kumandanız miniMedia/Media

miniMedia/Media uzaktan kumanda ile işitme sisteminin kablolu en yeni teknoloji ile birlikte kullanılabilir-sinir.

Özel bir Bluetooth bağlantısı sayesinde, cep telefonundan, televizyondan veya MP3 çalardan ses sinyalleri almak mümkün olur.

Diğer bilgileri işitme cihazı işletmecisinden alabilir veya miniMedia/Media uzaktan kumanda kılavuzunda bulabilirsiniz.

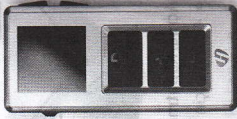

## Bakım uyarıları.

Temizlik için yalnızca işitme cihazı için ürettiğimiz HADEO bakım ürünlerini tavsiye ederiz. HADEO ürünlerini yalnızca işitme cihazı satıcımızdan temin edebilirsiniz.

- İşitme cihazlarınız zarar görmesini ve sağlık problemlerini önlemek için işitme cihazlarını düzenli olarak temizleyiniz.